



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мини WiFi эндоскоп Inskam 208 для
ушей, 720P, камера 3.9 мм.**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Использование.....	3
2. Параметры	4
3. Примечание	5

1. Использование


1. Скачайте и установите приложение “Time siso” из магазина приложений или отсканировав QR-код камерой вашего телефона.



2. Снимите защитную крышку, включите устройство. Должен загореться зеленый индикатор.



3. Наденьте нужную насадку из набора.

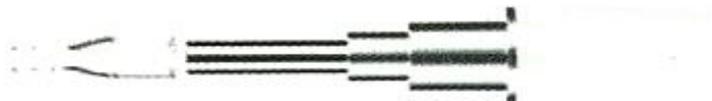

4. Запустите приложение “Time Siso” на вашем смартфоне или планшете.


5. Нажмите кнопку “Connect” и подключитесь к сети Wi-Fi, которую раздает эндоскоп. Она начинается с “Timesiso-xxxx” (введите пароль по умолчанию 12345678).



6. После успешного подключения к сети запустите приложение Time Siso.

7. Теперь вы можете обсматривать полость уха в реальном времени через экран телефона.

8. Зарядите эндоскоп. Красный свет индикатора показывает, что эндоскоп заряжается. Зеленый свет означает, что зарядка завершена.

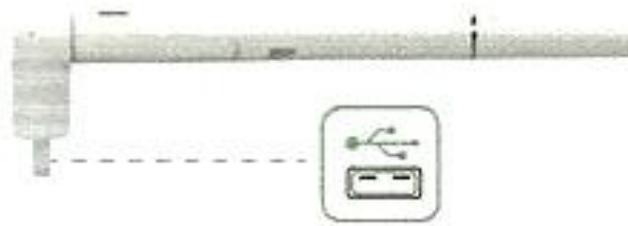

2. Параметры

- Модель: 100 E.
- Пиксели: 3 млн.
- Диаметр камеры 3,9 мм.
- Матрица: CMOS.
- Гироскоп: 4 оси.
- Фокусное расстояние: 15 – 20 мм.
- Время зарядки ≈ 40 минут.
- Время работы: ≈ 1,5 часа.

3. Примечание

1. При использовании температура эндоскопа немного повысится, это нормальное явление. Продолжайте использование устройства.
2. Аппарат имеет встроенную перезаряжаемую литиевую батарею. Первый раз рекомендуется полностью зарядить. Характеристики, которыми должно обладать ваше зарядное устройство таковы: 5 Вольт, 1 Ампер.
3. Эндоскоп подходит для использования совместно со смартфонами и планшетами. Лучшее изображение снимается с расстояния 1,4-2 см. Смотрите на безопасном расстоянии.
4. Если появляется цветной экран, мигает красный индикатор, зарядите устройство.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**